

NEBUSONIC

Es el más moderno sistema de nebulización descubierto hasta hoy, el cual reemplaza con innumerables ventajas a todos los sistemas tradicionales.

Las diferencias entre el sistema anterior y el ULTRASONICO radica fundamentalmente en que el primero produce una cantidad limitada de niebla de partículas "gruesas", mientras que el ULTRASONICO regula hasta una gran cantidad de niebla de micro partículas muy "finas" con un grado de penetración tan profunda, que permite lograr resultados mucho más rápidos y efectivos con respecto a todo lo conocido.

Otra de las ventajas que brinda MINISONIC por su sistema ULTRASONICO es el "silencio total" que sumado al menor tiempo de nebulización (la tercera parte de los nebulizadores convencionales) facilita enormemente la aplicación en niños, ya que este sistema no les resulta traumático.

La confianza en el hogar.

*Sistema ultrasónico
Tensión 220 Vca
Frecuencia 50/60 Hz.
Potencia 25 W
Control de niebla 1 Cm3 / minuto promedio
Frecuencia ultrasónica 1,7 Mhz
Llave de encendido de potencia fija
Regulador de potencia de 3 posiciones
Sensor de nivel de Agua.
Mascara para niños
Mascara para adultos
GARANTÍA DE 1 AÑO*

Permite una máxima atomización de la solución medicamentosa utilizada, favoreciendo su penetración en las vías respiratorias. NEBUSONIC es particularmente aconsejable para afecciones como: BRONQUITIS CRONICA, ASMA BRONQUIAL, BRONCO NEUMONIAS, NEUMO PATOLOGIAS, EFISEMA PULMONAR, SINUSITIS, FARINGITIS, ALERGIAS, etc.

Línea de atención al Cliente +005411-6327-5238. You can always get an instant help if you use out Customer Care Line: +005411-6327-5238

GUIA DE INSTALACIÓN

1. GIRE LA PERILLA NEGRA DE CONTROL DE INTENSIDAD EN SENTIDO HORARIO HASTA LA SEGUNDA POSICION.
2. ENCIENDA EL NEBULIZADOR, DESDE EL BOTON DE ENCENDIDO, SWICH BLANCO.
3. quite la tapa plastica transparente, retire la pieza conica azul que se encuentra en la pileta.

COMIENZE A AGREGAR AGUA EN LA PILETA HASTA QUE SE APAGUE EL INDICADOR ROJO DE NIVEL DE AGUA, INSTANTANEAMENTE SE PRODUCIRA UN CHORRO DE AGUA.

IMPORTANTE: NO AGREGUE AGUA EN EXESO PORQUE AFECTA EL RENDIMIENTO DEL NEBULIZADOR (NO SOBREPASE MAS DE 1 MILIMETRO EL ELECTRODO DE NIVEL DE AGUA.

4. COLOQUE NUEVAMENTE LA PIEZA CONICA AZUL EN EL INTERIOR DE LA PILETA, Y COLOQUE EL MEDICAMENTO DE ACUERDO A LA PRESCRIPCION DEL MEDICO.
5. APLIQUE NUEVAMENTE LA TAPA PLASTICA TRANSPARENTE, Y CONECTE LAS MANGUERAS Y LA MASCARA.
6. AHORA REGULE LA CANTIDAD DE NIEBLA EN LA MASCARA CON EL CONTROL DE POTENCIA.

LIMPIEZA DESINFECCIÓN

Lave el conjunto de vaso, manguera y mascara introduciéndolos en una solución de agua con lavandina (5 gotas por litro) luego de ser utilizado si: Cambia la medicación. Cambia de paciente. Si no lo utiliza frecuentemente.

ADVERTENCIA

Verifique periódicamente el estado de la membrana ubicada en la parte inferior de la pieza cónica. Evite abolladuras y roturas. Ante la duda, comuníquese con los teléfonos de referencia.

ACCESORIOS

- 1 VASO CÓNICO INTERNO
- 1 MANGUERA DE MATERIAL ATOXICO
- 1 MASCARA PARA ADULTOS
- 1 MASCARA PEDIATRICA

Línea de atención al Cliente +005411-6327-5238. You can always get an instant help if you use our Customer Care Line: +005411-6327-5238