

SuperNebu

El **SuperNebu**LEM representa lo mas avanzado en sistemas de nebulización familiar, por su práctico diseño, perfección técnica, manejabilidad, resistencia, y **absoluta ausencia de mantención**, son algunas de sus relevantes ventajas que lo ubican a la vanguardia de los nebulizadores a pistón.

La presión generada por el compresor a pistón, permite una máxima automatización de la solución medicamentosa utilizada, favoreciendo su penetración en las vías respiratorias. NEBU-LEM SUPER es particularmente aconsejable para afecciones como: BRONQUITIS CRONICA, ASMA BRONQUIAL, BRONCO NEUMONIAS, NEUMO PATOLOGIAS, EFISEMA PULMONAR, SINUSITIS, FARINGITIS, ALERGIAS, etc.

La confianza en el hogar.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

1. CONECTAR EL ENCHUFE DEL NEBULIZADOR A UN TOMA DOMICILIARIO DE 220 VOLT 50 C/S.
2. INTRODUCIR EL MEDICAMENTO EN LA AMPOLLA DE NEBULIZACIÓN.
3. CONECTAR LA MANGUERA AL PICO DE ENTRADA DE AIRE DE LA AMPOLLA DE NEBULIZACIÓN.
4. APLICAR AL PICO DE SALIDA DE LA AMPOLLA DE NEBULIZACION, EL ACCESORIO NECESARIO (MASCARA, MASCARA PEDIATRICA, CANULA NASAL,ETC).
5. **MUY IMPORTANTE: SE DEBEN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES EN EL ORDEN INDICADO.**
6. PONER EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO, ACCIONANDO EL INTERRUPTOR.
7. CONECTAR AL PICO DE SALIDA DE AIRE DEL APARATO, N(NEBULIZADOR) EL EXTREMO LIBRE DE LA MANGUERA.

EN CASO QUE EL APARATO DEBA CUMPLIR LA FUNCION DE ASPIRADOR, SE DEBERA UTILIZAR UNA AMPOLLA DE ASPIRACION CONECTADA A UN EXTREMO DE LA MANGUERA Y EL EXTREMO LIBRE DE LA MANGUERA SE DEBERA CONECTAR EN LA SALIDA A(ASPIRADOR)

RECUERDE SIEMPRE QUE LA UTILIZACION Y DOSIFICACION DE MEDICAMENTOS, DEBE SER RECETADA POR UN MEDICO, PARA QUE EL TRATAMIENTO SEA EL MAS IDONEO PARA ELIMINAR LA AFECCION.

CARACTERISTICAS TECNICAS

GRUPO COMPRESOR DE TIPO MOTOR ROTATIVO A PISTON.

POTENCIA 65W.

TENSION DE ALIMENTACION 220 VOLT. 50 Hz

ACCESORIOS

1 AMPOLLA DE NEBULIZAR

1 MANGUERA DE MATERIAL ATOXICO

MASCARA PARA ADULTOS

MASCARA PEDIATRICA

PRECAUCIONES

Jamás conecte la ampolla de nebulizar a la salida A(ASPIRADOR)

Jamás deba sumergir en agua el nebulizador, ni exponerlo a fuente de calor

EN CASO DE NECESIDAD DE REPARACION RECURRA AL FABRICANTE O AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO.

Línea de atención al Cliente +005411-6327-5238. You can always get an instant help if you use out Customer Care Line: +005411-6327-5238